

# Kaiko–neodisher® SBR Extra

## PESU– JA DESINFEKTIOAINEET

Alusastioiden, virtsapullojen ym. pesuun huuhtelupesulaitteissa.

### Yleistä

Alusastioiden, virtsapullojen ym. pesuun huuhtelu-  
pesulaitteissa.

SBR Extra on nestemäinen vähävahtoinen pesuaine.

Se poistaa jopa itsepäiset tahrat, kuten kalkkijäämät  
ja jäämät sytostaattisista ihmisen ulosteista.

SBR Extraa voidaan käyttää riippumatta veden ko-  
vuudesta.



SBR extra

Ympäristöystävällinen

---

CE–merkitty

---

Hellävarainen

---

Sopii eri materiaaleille

---

Vähävahtoinen

---

### Käyttö ja annostelu

- 1-3 ml/l riippuen veden kovuudesta.
- Huuhtele annostelujärjestelmä mukaan lukien.
- Imuletkut ennen pesuaineen vaihtoa.
- Noudata laitteen valmistajan ohjeita.
- Älä sekoita muiden pesuaineiden kanssa.
- Ainoastaan ammattimaiseen käyttöön.



### Tekniset tiedot

- Tiheys: (20 °C): 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- pH-alue (määritetty de-ionisoidussa vedessä), 20 °C) 1-3 %: 11.2-11.5
- Viskositeetti (tiiviste, 20 °C): <50 mPas
- 5 litran kanisteri

### Ainesosat

Ainesosat EU-määräyksen nro. 648/2004 mukaan:

- < 5 % fosfaatteja
- 15-30 € EDTA

### CE-merkki

SBX extra täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti.

### Säilytys ja varastointi

Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 3 vuotta.

### Vaara- ja turvalausekkeet

Katso turvallisuus ohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa.

