



	<p>Hyväksytty tulos: Molemmat testitahrat ovat puhdistuneet.</p>
	<p>Tulos: Polysakkariditestitahra on puhdistunut, mutta valkuaisainejäämiä on jäljellä.</p> <p>Syy: Proteiinia liuottavat parametrit eivät ole kohdallaan.</p> <p>Toimenpiteet: Tarkista ja korjaa: pesuaika ja -lämpötila / pesuaineen tehokkuus ja annostelu.</p>
	<p>Tulos: Veritestitahra on puhdistunut, mutta polysakkaridijäämiä jäljellä.</p> <p>Syy: Polysakkaridia liuottavat parametrit eivät ole kohdallaan.</p> <p>Toimenpiteet: Tarkista ja korjaa: veden laatu / pesuaineen tehokkuus ja annostelu / pesuaika ja -lämpötila.</p>
	<p>Tulos: Polysakkariditestitahra puhdistunut, mutta proteiinijäämiä on jäljellä.</p> <p>Syy: Proteiini ei pilkkoudu tehokkaasti (lämmön tai desinfioinnin vaikutuksesta).</p> <p>Toimenpiteet: Tarkista ja korjaa: pesulämpötila (liian korkea) ja desinfiointiasetukset. Jos mahdollista, käytä kylmää esihuuhtelua.</p>
	<p>Tulos: Molemmat testitahrat jäljellä.</p> <p>Syy: Ei virtausta/pesu tehoton.</p> <p>Toimenpiteet: Tarkista FlexiCheck -testin kiinnitys, laite ja pesuohjelma.</p>