

# Kaiko-KaiClean autoklaavipesuharjat

## KAIKOMEDI TARVIKKEET

**Pesuharjat on kehitetty välinehuollon sekä muiden yksiköiden autoklaavien kammioiden ym. puhdistukseen.**

### Toiminta

Käytä autoklaavin kammion puhdistuksessa aina puhdistettua vedettä (RO vesi tai Aqua) ja siihen tarkoitettuja autoklaavien puhdistusharjoja, näin ennaltaehkäistään mineraalien kertyminen kammion seinämiin.



*Pesuharja varrella*

### Kammion puhdistusohjeita

Puhdista autoklaavin kammio kerran viikossa käyttäen pesuharjojen kanssa puhdistettua vettä (RO-vesi tai Aqua).

Puhdistettu vesi irrottaa kammioon kertyneet epäpuhtaudet (mineraalit).

Jos käytössä ei ole tarkoitukseen soveltuvia harjoja, tulee puhdistukseen käyttää nukkaamatonta kertakäyttöliinaa.

Ergonominen varsi

Turvallisia metallipinnoille

BPA vapaat

Pitkäikäisiä käytössä

Ammattikäyttöön

## Harjojen puhdistusohjeet

- Puhdistukseen suositellaan desinfioivan instrumenttipesukoneen käyttöä
- Loppuhuuhdteluun suositellaan käytettäväksi RO-vettä
- Harjat ovat tuuheita ja siksi ne on hyvä tukea pesun ajaksi. Tähän voi käyttää reiällistä alustaa, jossa on kiinnitys harjalle myös reiällinen kansi harjan päällä sopii harjan tukemiseen
- Harjoja ei saa pinota päällekkäin pesun ajaksi



## KaiClean autokaavipesuharjat




Yleispuhdistusharja  
Koodi USN-01




Teleskooppivarsi  
harjoille TB-01 ja  
DB-01.  
Pituus 20-135 mm.  
Koodi TH-01



Pohjaviemärin  
puhdistukseen.  
Koodi 545

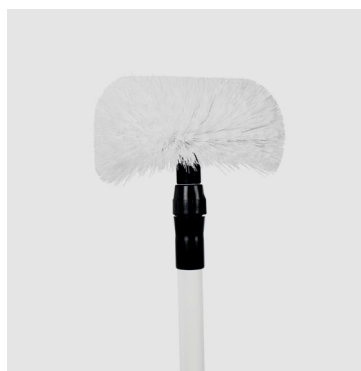

Autoklaavin pohjan ja  
seinien puhdistusharja  
edestäpäin.  
Koodi DB-01

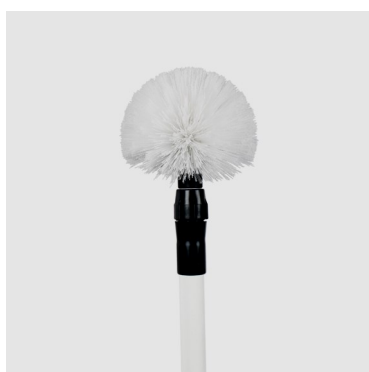

Autoklaavin  
kammion nurkkien  
puhdistukseen.  
Koodi TB-01



Harja DB-01 takaa-  
päin.