

Kaiko-Dry Heat

STERILOINNIN VALVONTAAN

Kemiallinen Dry Heat prosessi-indikaattori on suunniteltu kuumailmasteriloinnin valvontaan. Indikaattoriteippi tulisi kiinnittää jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen tai tuotteeseen.

Standardien ISO 11140-1 luokan 1 mukainen.

Toiminta

Indikaattorit kiinnittyvät teippinsä ansiosta helposti lähes kaikkiin pintoihin (metalli, kumi, lasi)

Helppo todeta tulos värimuutoksen kautta. Liuskan vihreä raita muuttuu värinsä mustaksi, kun liuska on altistunut kuumailmasteriloinnin olosuhteille.

Värimuutos aika 160 °C asteessa on 10 minuuttia (+/- 5 min.).

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on painettuna tuotannon numerosarja.

Käyttö

Pese aina steriloitavat tuotteet ennen sterilointia kunkin instrumentin tai tuotteen vaatimalla tavalla.

Aseta indikaattoritarra jokaiseen sterilointipakkaukseen tai jokaiselle sterilointitarjottimelle.

Valitse normaali sterilointiohjelma ja aja ohjelma läpi tavallisen käytännön mukaisesti.

Indikaattoriliuskan väri muuttuu mustaksi ohjelman aikana jos sterilointiolosuhteet ovat oikeanlaiset.

Jos väri ei kuitenkaan muutu kokonaan mustaksi, tarkista että olet ajanut normaali ohjelman. Älä käytä kuumailmasterilaattoria sterilointiin jos indikaattoriliuskan väri ei muutu täysin. Laite vaatii tällöin mitä todennäköisimmin huoltoa.



Dry Heat

Helppo käyttää

Kuumailmasteriloinnin valvontaan

Helppo tulkinta

Helppo kiinnittää eri pintoihin

Selkeä värimuutos

Pakkaus

1000 kpl/paketti.
Tuotekoodi: CI-113.

Varastointi

Varastoi suojapussissa +10 - +38 °C lämpötilassa, normaalissa ilmankosteudessa.
Varastointiaika: 5 vuotta valmistuspäivästä.