

Kaiko-neoform[®] RTF

PESU- JA DESINFEKTIOAINEET

Kertakäyttöiset liinat käytettäviksi pesu- ja desinfiointiaineiden kanssa.

Yleistä

Pintojen, laitteiden, lääkinnällisten laitteiden puhdistukseen ja desinfiointiin yhdessä sopivien Dr. Weigerin pintadesinfiointiaineiden kanssa.

Käyttökohteita ovat pinnat mm. sairaaloissa, vanhusten palvelukodeissa / hoitokodeissa, kemian ja lääketieteellisuuden alueilla, laboratorioissa sekä elintarvikkeiden jalostusyrityksissä ja ammatillisissa keittiöissä.

Soveltuu myös riskialttiille alueille, kuten neonatologia tai hematologinen onkologia VAH1-suosituksen mukaisesti.

Imukykyiset, nukkaamattomat ja kertakäyttöiset liinat optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Eryteisesti suunniteltu kannen aukko mahdollistaa kertakäyttöisen liinan helpon ottamisen astiasta, aukko mahdollistaa myös helpon uudelleen sulkemisen, kansi lukittuu vaivattomasti kiinni.

Pinottava ja tilaa säästävä.



RTF

Imukyinen

Nukkaamaton

Helppo avaus ja suljenta

Pinottava

Pinnoille



KaikoMedi

Yleistä

- Monipuolinen, yhteensopiva monenlaisten Dr. Weigertin pinta-desinfointiaineiden kanssa, osoitettu 4-alatestillä (EN 16615).
- Käyttövalmiiden liinojen desinfiointivaikutus on oikein säilytettyinä 28 päivää, osoitettu 4-alatestillä (EN 16615)
- Kätevä pakkaus sisältää pyyherullan sekä tukevan kahvan, jotta käyttö on turvallista ja helppoa.
- Uudelleen suljettavan pakkauksen ansiosta pyyhkeet eivät pääse kuivumaan ja saastumaan, mikä takaa korkean hygieniaturvallisuuden.
- Vastaa – yhdessä seuraavien pinta-desinfointiaineiden kanssa – VAH1:n vaatimuksiin. "Suositus kriittisten kohteiden kontrolloimiseksi kun käytetään liinoja pyyhkimiseen pinnan desinfiointia varten."

Käyttö ja annostelu

- Ennen käyttövalmiiden kertakäyttöisten liinojen valmistelua desinfioi kädet ja käytä suojakäsineitä.
- Avaa annostelijan kansi ja poista sulkusuoja. Täytä sitten astia hitaasti 2,25 litralla käyttövalmista desinfiointiaineiliuosta. Noudata tarkasti desinfointiaineen annosteluohjeita.
- Vedä ensimmäinen liina annosteluaukosta, repäise se irti, jonka jälkeen heitä se pois.
- Sulje kansi tiukasti. Täytä annostelupakkaukseen seuraavat tiedot: (tuotteen nimi, erä, valmistuspäivä-määrä, pitoisuus, käyttöpäivämäärä). 30 minuutin kuluttua liinat ovat käyttövalmiita.
- Pyyhi desinfioitavat pinnat varovasti RTF -liinalla. Turvallista desinfiointia varten varmista, että pinnat ovat täysin kostutetut ja noudata tuotekohtaista vaikutusaikaa. Hävitä liina asianmukaisesti.
- Pidä liinojen annostelija aina tiiviisti suljettuna, kun olet ottanut liinan.
- Liinojen hävittäminen: Kierrätä liinat, kaikki tuotejäämät ja annostelija asianmukaisesti käytön jälkeen tai säilyvyysajan päätyttyä.
- Kostutettuja RTF -liinoja voidaan käyttää jopa 28 päivän ajan jos annostelijan kansi on suljettu tiiviisti.

Soveltuvuus:

- neofom Classic
- neofom MED FF
- neofom Rapid
- neofom K plus
- neofom K sprint

Huomautuksia käyttöön:

- Vain ammattikäyttöön.
- Ei sovellu vauvanhoitoon.
- Ei sovellu ihon desinfiointiin.
- Älä hävitä WC-pönttöön.
- Älä käytä kuivia liinoja.

Tekniset tiedot

- Materiaali 100 % PET
- Liinoja rullassa 115 kpl
- Rullan paino 425 g
- Liinan koko 30 x 25 cm²



Säilytys ja varastointi

Säilytä pölyltä, kosteudelta ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 5 vuotta.

Vaara- ja turvalausekkeet

Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa.