

# Kaiko-CrossChecks L

## STERILOINNIN VALVONTAAN

**Kemiallinen Cross-Checks L prosessi-indikaattori on suunniteltu höyrysteriloinnin tehon tarkkailuun. Indikaattoriliuska tulisi asettaa jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.**

**Standardien En 867-1 luokan D, ISO 11140-1 luokan 4 mukainen.**

### Toiminta

Helppo todeta tulos värimuutoksen kautta. Liuskan valkoinen muuttuu värinsä mustaksi, kun liuska on altistunut höyrysteriloinnin olosuhteille.

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on valmiiksi painettuna musta vakiovärinen nuoli, joka auttaa tulkinnessa.

Värimuutos aika 134 °C asteessa (+ 0/-2 °C) on 3 minuuttia (+ 0/-45 s.) ja 121 °C asteessa (+ 0/-2 °C) 15 minuuttia (+ 0/-2.6 min).

Laminointi estää indikaattorin väriä leviämästä ja tuotteiden värjäytymistä.

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on painettuna tuotannon numerosarja.

### Käyttö

Aseta indikaattoriliuska jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.



CrossChecks L

Helppo käyttää

Höyrysteriloinnin tehon tarkkailuun

Helppo tulkinta

Laminoitu

### Pakkaus

250 kpl/paketti.

Tuotekoodi: CI-111.

### Varastointi

Varastoi suojapussissa 0 - +45 °C lämpötilassa, normaalissa ilmankosteudessa.

Varastointiaika: 5 vuotta valmistuspäivästä.