

Kaiko-Green Card T

STERILOINNIN VALVONTAAN

Green Card T (BD-120) on Bowie-Dick testikortti pienen autoklaavin ilmanpoistotehon ja sterilointihöyryn tunkeutumistehon testaamiseen.

Erityinen pussipakkaus suojaa testikorttia altistumasta ylimääräiselle määrälle höyrylle, jota esiintyy joskus pienissä autoklaaveissa.

Testi on suoritettava joka aamu pienille, B-luokan autoklaaveille.

Täyttää EN 867-5 standardin.

Käyttö

Suorita Bowie-Dick testi joka aamu tyhjällä autoklaavilla, ennen varsinaisten kuormien ajoa.

Autoklaavin toimintalämpötila (134 °C) tulee olla saavutettu ennen Bowie-Dick testin suorittamista. Tarvittaessa aja lämmitysajo.

Kiinnitä korttien mukana oleva metallilenkki Green Card T pussin yläreunassa olevaan reikään. Metallilenkki toimii painona ja auttaa testipussia pysymään paikoillaan autoklaavissa sterilointiprosessin aikana.

Aseta indikaattoripakkaus tyhjän kammion kylmimpään pisteeseen (alin hyly tai kori heti oven edessä) pussin läpinäkyvä puoli ylöspäin.

Käynnistä Bowie-Dick ohjelma (3,5 min; 134 °C).

Jos laitteessa ei ole erillistä Bowie&Dick testiohjelmaa, niin tee testi normaalilla 134 °C ohjelmalla. Huom! Testi voi muuttua ruskeaksi ohjelman kuivausajan vuoksi, se ei ole virhe, ainoastaan punainen väri kertoo virheestä.

Poista testipussi autoklaavista. Tulkitse tulos: mikäli kortin väri on vaihtunut vihreäksi, tulos on ok. Kirjaa ylös testin tulos kortin kääntöpuolelle.

Säilytä metallilenkki seuraavaa käyttökertaa varten. Huomioi metallilenkkiä käsitellessäsi, että se saattaa olla kuuma.

Mikäli testi ei mene läpi (kortti ei muuta väriä vihreäksi tai korttiin jää punaista väriä), suositellaan testin tekemistä uudelleen.



Green Card T

Helppo käyttää


Alle 60 l esityhjiöisille höyry-
autoklaaveille

Valmis testipakkaus

Ekologinen

Tulkinta

Käyttämätön kortti on punainen.

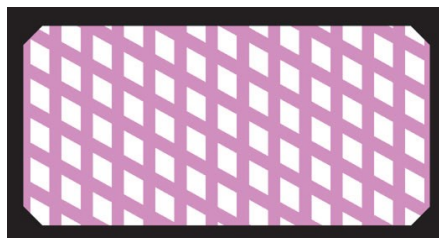

Tulos OK, kun kortti on kauttaaltaan vihreä.



Punaista väriä kortin keskustassa. Auto-
klaavin ilmanpoistokyky on puutteellinen.
Autoklaavi on korjattava.



Tulkinta

Site – Paikka

Department – Osasto

Autoclave n. – Laite nro

Cycle no. – Ohjelman numero

Operator – Testin suorittaja

Supervisor – Osaston vastaava

Date – Päivämäärä

Result – Tulos: Pass – OK, Fail – Virhe

GREEN CARD T Bowie-Dick Test			
EN 867-5 CLASS B / REF BD 120			
STEAM VAPORE VAPEUR VAPOR 134°C - 3.5 MIN			
SITE / LUOGO / SITIO:		DEPARTMENT / REPARTO / SERVICE / DEPARTAMENTO:	
AUTOCLAVE N.:	CYCLE NO. / CICLO NO.:	OPERATOR / OPERATORE OPERATEUR / OPERARIO:	
SUPERVISOR / SUPERVISEUR SUPERVISEUR:		RESULT / RISULTATO RESULTAT / RESULTADO:	
DATE / DATA / FECHA:		PASS RIUSCITO CONFORME CORRECTO FAIL FALLITO NON CONFORME INCORRECTO	
 Castle Rock, CO 80109 • USA		LOT 051201 2008-12	

Varastointi

Normaalissa huoneenlämmössä (10 °C – 38 °C), ilmankosteus 10–60%.

Mikäli tuote on varastoitu ohjeiden mukaisesti, on sen varastoikä 3 vuotta.