

Kaiko-mustesaumaustesti

KUUMASAUMAAJAT

Testiä käytetään sterilointipussien saumauslaadun varmistamiseen.

Toiminta

Mustesaumaustesti on helppo uudenlainen rutiinittesti eri tyyppisille saumalaitteille. Se sopii paperi- ja kuitukangas materiaaleille.

Mustesaumaustesti on helppo, turvallinen ja nopea testitapa joka täyttää DIN EN ISO 11607-1 Appendix B ja ASTM F1929 vaatimukset.

Saumaustestillä voi tehdä testauksen yhteydessä sauman laatutestaus sotkematta ympäristöä musteseen, pipetin käyttöä ja täyttöä ei tarvita.

Testi laitetaan sterilointipussin sisälle, jonka jälkeen pussi saumataan. Saumaamisen jälkeen kapselissa oleva muste vapautetaan peukalolla painamalla.

Jos muste pysyy sterilointipussin sisällä ja saumat ovat virheettömät, testitulos on hyväksytty.

Jos mustetta tunkeutuu joko tehdassauman tai saumaajalla tehdyn sauman sisään, testitulos on hylätty.

Pakkauskoko: 40 kapselia/pkt.

Kaikon tuotekoodi: tulossa
Valmistajan REF: 8881170



Mustesaumaustesti

Helppokäyttöinen

Turvallinen

Nopea testitapa

Ei sotke ympäristöä

DIN EN ISO 11607-1

Edut

- Käyttämällä helppokäyttöistä kapseli mustetestiä, ehkäistään sterilointipussin vaurioituminen
- Tällaisessa tilanteessa mustetta voi valua ympäröiville pinnoille

Käyttö

- Laita mustekapseli sterilointipussin sisään ja sulje pussi kuumasaumajalla
- Pidä pussista molemmilla käsillä kiinni siten, että peukalot ja etusormet ovat vastakkain
- Naksauta kapselin kärkeä, nyt voi valuttaa musteen kapselin sisältä.

Tulkinta

- Valuta muste saumojen sisäpuolelle ja jos muste pysyy saumojen sisäpuolella, testi on hyväksytty.
- Jos mustetta valuu saumojen sisään, tulos on hylätty.

Käytetyn testin hävittäminen

- Sterilointipussin paperipuoli kostuu musteesta, joten älä laske sterilointipussia pöytätasolle yms. vaan laita se suoraan sekajätteeseen.

Ominaisuuksia

- Kapselin mustemäärä on suunniteltu siten, että sitä on riittävästi, jotta pystytään testaamaan kaikki sterilointipussin saumat.

