

# Kaiko–neodisher® MediZym

## PESU– JA DESINFEKTIOAINEET

**Kirurgisten instrumenttien, anestesiavälineiden, taipuisien endoskooppien, containereiden ja muiden lääkinnällisten välineiden mekaaniseen pesuun.**

### Yleistä

MediZym on ympäristöystävällinen entsyymipohjainen pH-neutraali puhdistusaine.

Kuivat ja denaturoidut proteiini- ja verijäämät peseytyvät MediZym –pesuaineella, ollen samalla hellävarainen instrumenteille ja välineille.

Ruostumaton teräs, instrumentti teräs, kevytmetallit, lasi, tavalliset muovit sekä anestesia-laitteiden ja joustavien endoskooppien materiaalit soveltuvat MediZym –liuoksille.

Pesuaine soveltuu instrumenttipesukoneille, ultraäänipesulaitteille sekä manuaaliseen pesuun.



MediZym

Ympäristöystävällinen

---

CE-merkitty

---

Hellävarainen

---

Sopii eri materiaaleille

---

Neutraali

---

## Käyttö ja annostelu

Koneelliseen pesuun:  
0,2-1 % (2-10 ml/l) 40-50 °C.

Taipuisien endoskooppien pesukoneille:  
0,5 % (5 ml/l).

Manuaaliseen pesuun:

- Upotusneste: 0,5-2 %, 20-30 min.
- Ultraäänipesu: 0,5-2 %, 5-10 min.
- Pesunesteen saa lämmittää korkeintaan 45 °C.

Työskentelyneste tulee vaihtaa vähintään päivittäin.  
Käytön jälkeen instrumentit/välineet tulee huuhdella hyvin. Älä sekoita muiden pesuaineiden kanssa.

Ainoastaan ammattimaiseen käyttöön.

## Tekniset tiedot

- Tiheys: (20 °C): 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- pH-alue (määritetty de-ionisoidussa vedessä, 20 °C) 0,2-2 %: 7,6-7,7
- Viskositeetti (tiiviste, 20 °C): >10 mPas
- 5 litran kanisteri

## Ainesosat

Ainesosat EU-määräyksen nro. 648/2004 mukaan:

- > 5 % anionic pinta-aktiivisia aineita
- Myös entsyymejä, säilöntäaineita
- (phenoxyethanol, methyl-,ethyl-,butyl-,propyl-,isopropylparabene)

## CE-merkki

MediZym täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti.

## Säilytys ja varastointi

Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 2 vuotta.

## Vaara- ja turvalausekkeet

MediZym ei ole EU CLP-asetuksen nro. 1272/2008 mukainen vaarallinen tuote.

Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa.

