

Kaiko-Green Card

STERILOINNIN VALVONTAAN

Valmis Bowie-Dick testipakkaus esityhjiöisille, yli 60 l höyryautoklaaveille.

Täyttää EN ISO 11140-4 standardin.

Toiminta

Green Card laminoitu testikortti telineeseen asetettuna vastaa pahviliuskatestipakettia. Green Card Bowie-Dick testi on tarkoitettu suuren, yli 60 litraisen esityhjiöllisen höyryautoklaavin ilmanpoisto- ja höyryn tunkeutumiskyvyn testaamiseen.

Testi on suoritettava joka aamu suurille autoklaaveille. Testaaminen on osa normin EN 554 mukaista autoklaavin toimintakunnon todentamista.

Testi on ympäristöystävällinen, vie vähemmän kuljetus- ja pakkaustilaa sekä tuo vähemmän jätettä.

Käyttö

Autoklaavin toimintalämpötila (134 °C) tulee olla saavutettu ennen Bowie-Dick testin suorittamista. Tarvittaessa aja lämmitysajo.

Aseta kortti telineeseen punainen indikaattori puoli ylöspäin (kirjauspuoli alaspäin).


Aseta teline tyhjän autoklaavin alatasolle, lähelle pohjasuodatinta / ovea (kylmin paikka).

Käynnistä Bowie-Dick ohjelma.

Poista teline ja indikaattori autoklaavista (suojakäsineet!).

Tulkitse tulos.

Kirjaa testin tiedot indikaattorin kääntöpuolelle.

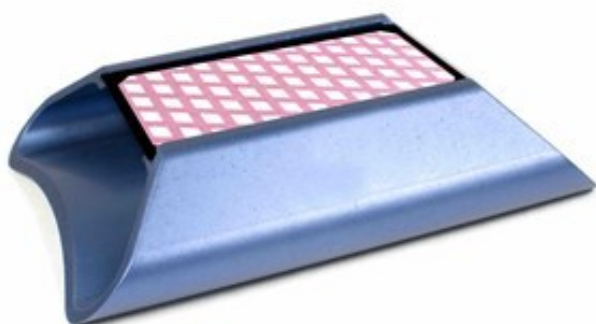

Green Card

Helppo käyttää


Yli 60 l esityhjiöisille höyryautoklaaveille

Valmis testipakkaus

Ekologinen ja monikäyttöinen

Tulkinta

Käyttämätön kortti on punainen.

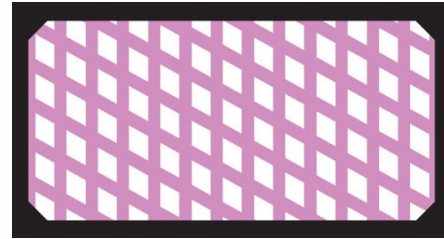

Tulos OK, kun kortti on kauttaaltaan vihreä.



Punaista väriä kortin keskustassa. Auto-
klaavin ilmanpoistokyky on puutteellinen.
Autoklaavi on korjattava.



Tulkinta

Site - paikka

Dept - osasto

Machine # - laite nro

Cycle # - ohjelman nro

Operator - testin suorittaja

Date - päivämäärä

Supervisor - osaston vastaava

GREEN CARD S/T		Bowie-Dick Test	
3.5 min. at 134°C EN 867-4		<input checked="" type="checkbox"/> STEAM	REF BD 117
Site: _____	Dept: _____	Machine #: _____	Cycle #: _____
Operator: _____	Date: _____	Supervisor: _____	Result: PASS <input type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/>
Steri-Tec.	LOT 0308	2006-08	LP-036 Rev. A
Castle Rock, CO 80109, USA			

Pakkaus

BD-117: 120 kpl Green Card testikortteja.

BD-1170: 30 kpl Green Card testikortteja.

BD-1180: 1 kpl Green Card testiteline.

Varastointi

Testikortit on säilytettävä uudelleen suljettavassa alkuperäispakkauksessa, 0 - +40 °C lämpötilassa.

Käyttöaika 2 vuotta valmistuspäivästä.