

Kaiko – neodisher® endo CLEAN

PESU – JA DESINFEKTIOAINEET

Taipuisien endoskooppien ja niiden tarvikkeiden koneelliseen – ja manuaaliseen pesuun tarkoitettu pesuaine.

Yleistä

Erinomainen materiaalien yhteensopivuus, sopii kaikkien johtavien pesukonevalmistajien pesukoneille. Manuaaliseen puhdistukseen upottamalla tai ultra-äänipesuun.

Kun käytät myös endo CLEAN –puhdistusta manuaaliseen esipuhdistukseen, puhdistusainetta ei tarvitse huuhdella ennen automaattista uudelleen käsittelyä.

Täyttää Robert Koch –instituutin (RKI) suositukset lääkinällisten laitteiden uudelleen käsittelyä varten, jotta minimoidaan Cretzfeldt–Jakobin taudin (vCJD) uuden version leviämisen riski.

Pakkauskoost

- Kanisterit: 5 , 10 ja 20 litraa
- Tynnyri 220 kg
- Pullo 6 x 2 litraa



endo CLEAN

Ympäristöystävällinen

Tehokas alhaisissa lämpötiloissa

Matalavaahtoinen

Kaikille endoskoopeille

Poistaa biofilmin


Käyttö ja annostelu

Taipuisien endoskooppien pesukoneille:
0,5 % (5 ml/l) 35-55 °C, 3-5 min.

Endoskooppitarvikkeille:
(0.2-1.0 %) 2-10 ml/l, 10 min.

Manuaaliseen pesuun:

- (0.5-1.0) 5-10 ml/l, 5-10 min.
- Pesunesteen saa lämmittää korkeintaan 40 °C.
- Työskentelynestee tulee vaihtaa vähintään päivittäin,
tai jos se on kontaminoitunut.
- Tuotteita ei tarvitse huuhdella ennen pesukoneeseen
laittoa
- Älä sekoita muiden pesuaineiden kanssa.
- Ainoastaan ammattimaiseen käyttöön.

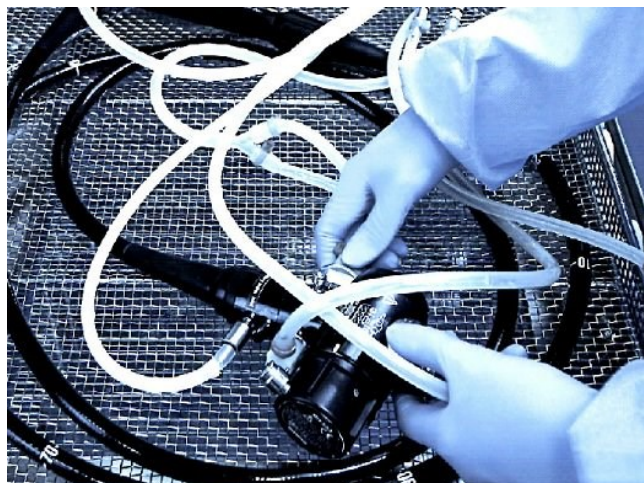

Tekniset tiedot

- pH-alue (5-30 ml/l, määritetty de-ionisoidussa vedessä, 20 °C) 11.0-11.3. pH alue riippuu veden laadusta.
- Viskositeetti (tiiviste, 20 °C): <10 mPas
- Tiheys 1.1 g/cm³ (20 °C)
- Titrauskerroin 0.76

Ainesosat

- Ainesosat EU-määräyksen nro. 648/2004 mukaan:
- < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita
- Myös entsyymejä

CE-merkki

endo CLEAN täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti.

Säilytys ja varastointi

Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa, lämpötilassa 0 °C-25 °C. Varastoinnin säilyvyysaika 2 vuotta.

Vaara- ja turvalausekkeet

neodisher endo CLEAN ei ole EU CLP-asetuksen nro. 1272/2008 mukainen vaarallinen tuote.

Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa.

