

# Kaiko-Pyromol

## PESUTEHON VALVONTATESTI

**Pyyhkäisytestisarja proteiinijäämien havaitsemiseen**

### Toiminta

Helppokäyttöinen, esivalmisteltu testisarja, joka havaitsee proteiinijäämät erilaisilta pinoilta. Sopii esimerkiksi eri pesulaitteiden, työskentelypintojen ja instrumenttien puhtauden varmistamiseen.


Esivalmisteltu testi - helppo käyttää.

Värimuutos siniseksi osoittaa 1 µg ja sitä suuremman proteiinijäämän 5 minuutissa.

Proteiinijäämien havaitseminen perustuu väriaineen sidontamettiin, jota käytetään kliinisen kemian proteiinimittauksissa. Esimerkiksi veressä on paljon proteiineja. Testisarja havaitsee pienetkin proteiinijäämät.

Sopii kaikille proteiineille - Ei vaadi inkubointia.

Glutaraldehydin tai peretiikkahapon käyttö eivät estä testin suorittamista.

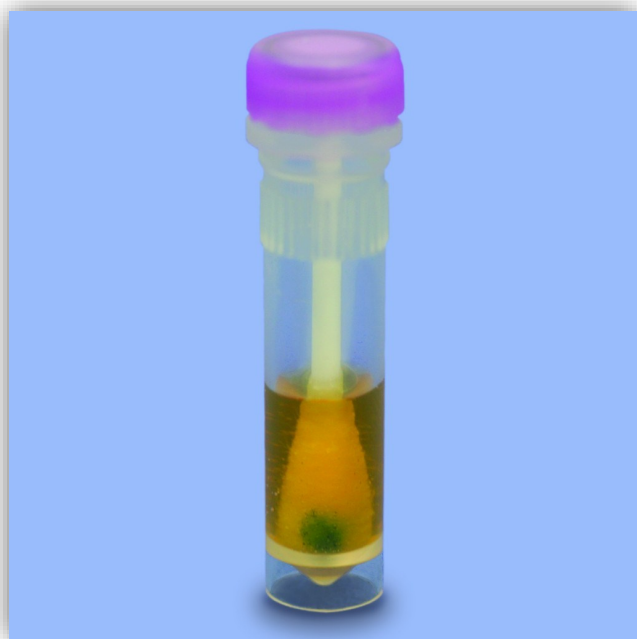

Pyromol

Esivalmisteltu testi

Helppokäyttöinen

Sopii kaikille pinoille


Sopii kaikille proteiineille

Havaitsee jopa 1 µm proteiinijäämät

## Käyttö

1. Pyyhkäise puikolla reippaasti kosteaa pintaa. Käytä kuivilla pinnoilla puhtaalla vedellä kostutettua puikkoa.
2. Keskity erityisesti kohteisiin, joissa jämiä todennäköisesti voisi olla (nivelet, raot, näkyvät tahrat tai värinmuutokset). Käytä pitkävärtistä puikkoa kanyyliomaisten instrumenttien pyyhkäisemiseen.
3. Avaa indikaattorikapseli ja laita pumpulipuikko kapseliin puikon pää alaspäin. Sulje kapseli, ravista 5 kertaa ja anna seistä 10 minuuttia.
4. Tarkista puikon väri—sininen väri kertoo proteiinijäämistä testatulla pinnalla. Jos proteiinijäämää esiintyy, voi värinmuutoksen havaita 1–5 minuutin kuluessa. Pidempi odotusaika antaa selvemmän tuloksen.
5. Kirjaa tulos ylös. 1 µg:n proteiinijäämä näkyy pumpulipuikossa pienenä sinisenä pisteenä. Saat selkeämmän kuvan tuloksesta kääntämällä kapselin ylösalaisin. Suuri määrä liukenevaa proteiinia voi muuttaa koko kapselin liuksen siniseksi.

**HUOM!** Käytä suojahanskoja testiä suorittaessasi, välttääksesi testiä kontaminoitumasta.

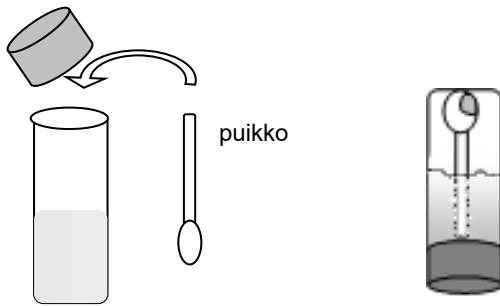

### Varastointi

Säilytä testit suojapakkauksessa, +2 – +25 C lämpötilassa.

Suojaa valolta ja kuumuudelta.

Katso viimeinen käyttökuukausi paketin tarrasta (käyttöaika 18 kk valmistuspäivästä).

### Pakkaus

Pakkauksessa on tarvikkeet 20 testiin.

Tuotekoodi: PEREG05.

### Lisätietoja

Toiminta-ajatus	Toiminta perustuu proteiinin hyvään kykyyn sitoa väriaineita. Siksi pienetkin proteiinijäämät on havaittavissa pyyhkäisytestillä. Pyyhkäisytesti on paras tekniikka liukenemattoman jäämän havaitsemiseen.
Käyttökohteet	Proteiinijäämien havaitsemiseen erilaisilta pinnoilta. Esim. pesu- ja desinfektiolaitteiden seinämät, ultraäänipesurit, työskentelypöydät, kirurgiset ja kanyyliomaiset instrumentit.
Mittausherkkyyys	Testillä voidaan havaita 1µg proteiinijäämät.
Häiriötekijät	Emäksisten aineiden sekä kvaternääristen ammoniumsuolojen (joissakin desinfointiaineissa) kanssa kosketuksiin joutuminen voi häiritä värinmuutosta. Testiä suorittaessa on käytettävä suojahanskoja, sillä käsistä voi kulkeutua proteiinipartikkeleita testiin ja näin testi voi näyttää väärää positiivista tulosta.
Huom!	Testi ei sovellu neutraalien pesuaineiden pesuainejäämien testaamiseen.