

Kaiko-SteriPak LF

STERILOINNIN VALVONTAAN

Valmis Bowie-Dick testipakkaus esityhjiöllisille höyryautoklaaveille.

Täyttää EN 867-3 standardin.

Toiminta

SteriPac LF on lyijytön BowieDick testipaketti autoklaavin ilmanpoistotehon ja sterilointihöyryn tunkeutumistehon testaamiseen.

Pakkaus on kertakäyttöinen ja valmis käytettäväksi sellaisenaan, ei vaadi esivalmisteluja.

Testi on suoritettava joka aamu ennen laitteen varsinaista käyttöä.



SteriPac LF

Helppo käyttää

Valmis testipakkaus

Esityhjiöisille höyryautoklaaveille

Kertakäyttöinen

Selkeä tulkinta




KaikoMedi

Tulkinta

✓ Hyväksytty tulos = musta

✓ Virhe = sininen

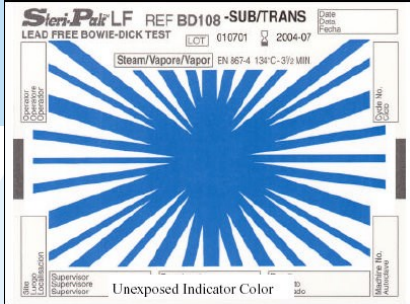

Käyttämättömässä testissä kuvio on kauttaaltaan sininen.




Hyväksytysti läpi mennessä testissä kuvio on kauttaaltaan musta.



VIRHE: Testi osoittaa virhettä, kun kuvion väri ei ole muuttunut kauttaaltaan mustaksi, vaan keskelle on jäänyt sininen läiskä.

Ilma ei ole poistunut pakkauksesta kokonaan.

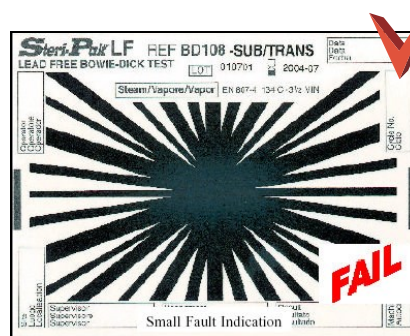

VIRHE: Testi osoittaa virhettä, kun kuvion väri ei ole muuttunut kauttaaltaan mustaksi, vaan keskelle on jäänyt pienikin sininen läiskä.

Ilma ei ole poistunut pakkauksesta kokonaan.

Tulosten kirjaus

Steri-Pak LF	
LEAD FREE BOWIE-DICK TEST	
[STEAM] [VAPEUR] [VAPEUR] [VAPOR] 134°C - 3.5 MIN, CLASS B	
INDICATOR TURNS FROM BLUE TO BLACK L'INDICATEUR VIRA DAL BLU AL NERO L'INDICATEUR VIRE DU BLEU AU NOIR EL INDICADOR CAMBIA DE AZUL A NEGRO	
SITE / LUOGO / SITIO:	DEPARTMENT / REPARTO / SERVICE / DEPARTAMENTO:
AUTOClave N.:	OPERATOR / OPERATORE / OPERATEUR / OPERARIO:
CYCLE NO. / CICLO NO.:	RESULT / RISULTATO / RESULTAT / RESULTADO:
SUPERVISOR / SUPERVISORE / SUPERVISEUR:	PASS / RISSITO / FALITO CONFORME / NON CONFORME CORRECTO / INCORRECTO
DATE / DATA / FECHA:	

Kirjaa testitulos arkin kääntöpuolelle.

Pakkaus

BD-108: 20 kpl käyttövalmiita testejä.
Tuotekoodi: ?

Varastointi

Varastoidaan normaalissa huoneenlämmössä (0 – 40 °C),
ilmankosteus 10–70 %.

Suojattava ylimääräiseltä kosteudelta ja valolta.

Oikein säilytettyinä testien käyttöaika on 3 vuotta valmistuspäivästä.