

Kaiko–neodisher® PreStop

PESU– JA DESINFEKTIOAINEET

Korroosionestoaine instrumenttien esikäsitteilyyn.

Yleistä

Suihkutettava vaaho.

Esikäsitteilyaine

Tilanteisiin, joissa instrumentteja ei voida pestä heti käytön jälkeen. Estää ruostumattomasta teräksestä valmistettujen instrumenttien pistemäisen korroosion, joka voi johtua veri- tai fysiologisen suolaliuoksen jäännöksistä.

Soveltuu kaikille instrumenteille, sekä mm. MIS-instrumenteille. Soveltuvuus anodisoidulle alumiinille on testattava ennen käyttöä.

Erityisominaisuudet

Estää instrumenttien jäämien kuivumista pitämällä ne märkinä. Helpottaa myöhempää puhdistusta ja jatkokäsittelyä.



neodisher PreStop

Esikäsitteilyyn

Vaaho, ei valu pinnoilta

Estää korroosiota

72 h vaikutusaika

Helpottaa jatkokäsittelyä



KaikoMedi

Käyttö ja annostelu

Levitys, annostus ja käyttö:

- Siirrä instrumentit heti toimenpiteiden jälkeen kannelliseen kuljetus/säilytysastiaan.
- neodisher PreStop levitetään suihkuttamalla laimentamatonta liuosta instrumenttien pinnoille.
- Varmista, että aine levittyy kaikille pinnoille.
- Tämän jälkeen sulje astia.
- Vaahdon kadottua, aine muuttuu nestemäiseksi tahmeaksi kalvoksi ja estää instrumentteja kuivumasta.
- neodisher PreStop -käsiteltyjä instrumentteja voidaan säilyttää jopa 72 tuntia.
- Vain ammattikäyttöön.
- Aineen levittämiseen on käytettävä toimitukseen kuuluvaa suulaketta.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.

Uudelleen käsittelyn tulisi olla kaikkien lääkinällisiä laitteita koskevien määräysten mukaista ja se tulisi suorittaa asianmukaisilla prosesseilla.

Noudata lääkinällisten laitteiden valmistajien uudelleen käsittelysuosituksia DIN EN ISO 1766 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Tekniset tiedot

- Pakkauskoko 12 x 0,75 ml
- pH 9,5 (20 °C lämpötilassa)
- Tiheys n. 1,0 g/cm³ (20 °C)

Sisältää


<5% anionisia ja amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita, myös entsyymejä, säilöntäaineita (3-jodi-2-propinylibutylikarbamaatti, 1,2-bentsisotiatsol-3 (2H) -oni).

CE-merkki

Neodisher PreStop täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti.

Säilytys ja varastointi

Säilytä aina lämpötilassa 0 °C - 25 °C. Pidä astia tiiviisti suljettuna. Pidä poissa auringonvalosta. Käytettävissä 2 vuoden ajan, kun varastoidaan suositusten mukaisesti. Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty tiimalasi-merkinnällä takana olevaan etikettiin.

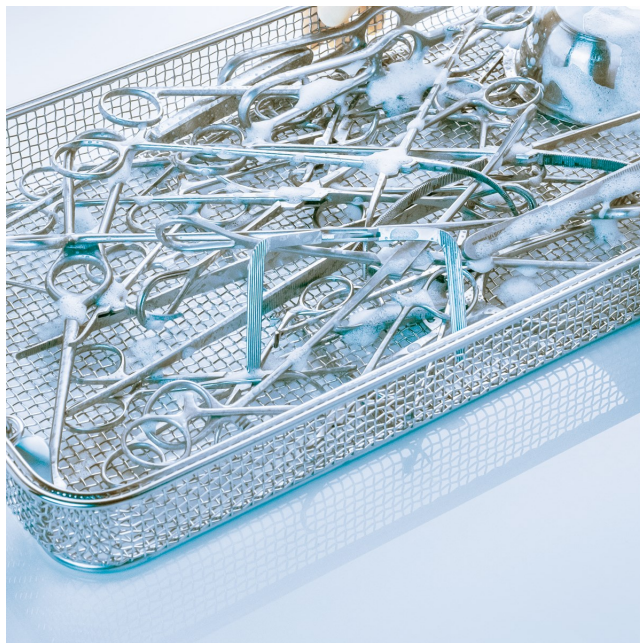

Estää mikro-organismien kasvu (bakteriostaattinen) ja samalla estää lian kuivumisen instrumentteihin.

Aine on vesiliukoinen ja hyvin huuhtoutuva.

