

Kaiko-Ink

SAUMAUSTESTIT

Standardin EN ISO 11607-1 mukainen ja tarkoitettu paperilaminaattipakkauksille sekä TYVEK ja Ultra -pakkausten sauman laadun rutiinitestaukseen.

Toiminta

INK-saumaustestin avulla voit tarkistaa sauman laadun, standardin EN ISO 11607-1 liitteen B mukaisesti.

Se on standardi testimenetelmä sauman rutiini-testaukseen ja näyttää sekunneissa, ohuimmatkin aukot, jotka eivät ole näkyneet paljaalla silmällä.

INK-Saumaustestejä on saatavana kahtena eri versiona:

- sininen -paperille / laminaatille.
- punainen -Tyvek® ja Ultra laminaatti-pakkauksiin.



Mustetestit

Paperilaminaatti pakkauksille

Ultra pakkauksille


Tyvek pakkauksille

Luotettava

Selkeät toimintaohjeet

Käyttöohje

1. Laita testattava näyte pidikkeeseen pystyyn.
2. Ime pipettiin 1–2 mm väriainetta ja valuta se paperi ja lami-naatin väliin. Varmista, että sitä on koko sauman leveydeltä.
3. Odota 10–20 sekuntia.
4. Tuona aikana väriaine tunkeutuu mahdollisiin saumassa oleviin aukkoihin ja kanaviin.
5. Jos väriainetta tunkeutuu saumaan, sauma on viallinen ja se on hylättävä, myös kuumasaumaajan kunto on tarkistettava.

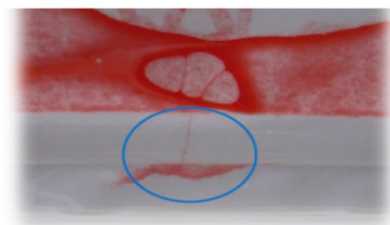

Huomioitavaa

- Vältä vaurioittamasta saumaa pipetillä kun valutat väriainetta.
- 1–2 ml riittää noin 180–200 mm levyiselle saumalle.
- Pullosta riittää n. 80 testikertaan mustetta.
- Jotta testi olisi taloudellinen ja ekologinen, käytä oikeaa väriainemäärää.
- Tarkista testin tulos oikean ajan kuluttua, liian pitkä vaikutusaika voi antaa virheellisen tuloksen → väriaine imeytyy materiaaliin.
- Väriaine on hajuton. Vältä joutumasta silmiin tai iholle.
- Väriaine sopii EN 868–5 mukaisesti TYVEK ja Ultra –pakkausmateriaaleille.
- Vältä väriaineen joutumista pinnoille, voi aiheuttaa pysyviä värimuutoksia.
- Iholle joutunut väriaine poistetaan saippuapesulla.
- Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin.

Pakkauskoko

80 ml sininen tai punainen väriainepullo + pipetti