

Kaiko-EmuGraph 4, 5 & 7

STERILOINNIN VALVONTAAN

Moni-informatiivinen indikaattori autoklaavin sterilointitehon todentamiseen.

EmuGraph kemialliset indikaattoreita on valittavissa kolmella eri sterilointiajalla 134 °C ja kahdella eri sterilointiajalla 121 °C. Indikaattorissa on molemminpuolinen laminointi. Indikaattoriväri on lyijytön ja myrkytön.

EN ISO 11140-1 luokan 6 mukainen emulaattoriliuska.

Toiminta

EmuGraph indikaattoreista on luettavissa, ovatko steriloinnissa vallinneet riittävät ja oikeat olosuhteet, jotta sterilointi on pakkausten sisälläkin mahdollista.

Sterilointi edellyttää, että kammiosta ja steriloitavista tuotteista on poistunut ilma, sterilointihöyry on kyllästetty ja että lämpötila ja vaikutusaika ovat oikeat.

EmuGraph indikaattoreita on kolmelle eri sterilointiajalle 134 °C ja kahdelle eri sterilointiajalle 121 °C.



EmuGraph 4, 5 & 7

Tulkinta

EmuGraph indikaattoriväri muuttuu vaaleanpunaisesta vihreäksi kun kaikki olosuhteet höyrysterilointiin ovat oikeat, aika, lämpötila ja höyryn laatu.

EmuGraph 4 on tarkoitettu 134 °C ohjelmalle, sterilointi-aika 4 min.

EmuGraph 5 on tarkoitettu 121 °C ohjelmalle, sterilointiaika 15 min. 134 °C ohjelmalle, sterilointiaika 5,5 min.

EmuGraph 7 on tarkoitettu 121 °C ohjelmalle, sterilointiaika 20 min. 134 °C ohjelmalle, sterilointiaika 7 min.

Käyttö

Aseta vähintään yksi EmuGraph liuska jokaiselle hyllylle sekä tarvittaessa steriloitavaan pakkaukseen.

Tulos on heti tulkittavissa ohjelman päätyttyä, tai kun pakkaus avataan.

Helppo käyttää

Moni-informatiivinen

3 eri sterilointiaikaa 134°C

2 eri sterilointiaikaa 121°C

Lyijytön ja myrkytön