

# Kaiko-Scope-Store+

## SKOOPPIEN KUIVAUS- JA SÄILYTYSKAAPPI

**Endoskooppien tehokas ja turvallinen kuivaus sekä säilytys. Täyttävät EN 16442 vaatimukset ja suositukset endoskooppien turvallisesta säilyttämisestä pesu- ja desinfiointiprosessin jälkeen.**

### Turvallista säilytystä endoskoopeillesi

Endoskooppien säilytysjärjestelmä on suunniteltu ja rakennettu yhdessä gastro-asiantuntijoiden kanssa.

Endoskoopit voidaan säilyttää joko pystysuunnassa tai hyllyillä:

- 10 endoskoopin pystysäilytys
- 5 endoskoopin pystysäilytys
- 10 endoskoopin kehäsäilytys hyllyillä



Scope-Store+ V10

### Ominaisuudet

- Graafinen kosketusnäyttö
- Ovien lukitus ja ikkunalliset ovet
- PIN-kooditunnistus
- Kaksoisilmansuodatus, 0,2 µm steriilisuodatin endoskooppien kanaville
- Ulkopuolinen ilmankierto HEPA-suodatetulla ilmalla.
- Antibakteerinen pinnoitus
- Säilytysaika jopa 30 päivää

Helppokäyttöinen

Turvallinen

Hiljainen

Kaikki koot myös läpiantoisena

Liitettävissä seurantajärjestelmiin

## Scope-Store+ endoskooppien säilytys

### Kaksoisilmasuodatus

Endoskooppien kanaviin kulkee puhdas ilma- virta 0,2 µm suodattimen läpi.

Ulkopuolinen ilma kulkee HEPA-suodattimen lävitse. Tällä järjestelmällä estetään mikro-organismien kasvu siten, että endoskoopit voidaan säilyttää jopa 30 vuorokautta turvallisesti.

Sisäinen tuuletin ja paineistus takaavat turvallisen säilytyksen.

Ristikontaminaation estämiseksi laitteen sisä- ja ulkopinnat ovat pulverimaalattu antibakteerisiksi.

Laitteessa on oma paineilmakompressori, joka on suuri etu, jos sairaalassa on useita kaappeja kytkettynä sairaalan omaan paineilmajärjestelmään. Mahdollisessa häiriötilanteessa mikään kaappi ei saisi tällöin paineilmaa.



Näyttö kun endoskooppi on ladattu paikalle 1, muut paikat tyhjiä.



Näyttö kun endoskooppi poistetaan kaapista.

### Kosketusnäyttö

Helppolukuinen, selkeä kosketusnäyttö. Valikosta luettavissa käyttäjien tiedot, säilytysajat muut tarvittavat tiedot.


Jokainen kuivattava ja säilytettävä endoskooppi yksilöidään ja sen paikka on tunnistettavissa näytöltä.

Endoskoopin säilytysaika näkyy graafisella näytöllä, endoskoopeille voidaan asettaa maksimi säilytysajat, joiden täytyessä laite hälyttää.

Laite myös seuraa ja kertoo kunkin endoskoopin kuluneen säilytysajan. Laite hälyttää jos asetettu säilytysaika ylittyy.

Oven lukitus. Oven avaus käyttäjätunnuksella ja PIN-koodilla.

Liitettävissä ulkopuoliseen seurantajärjestelmään.

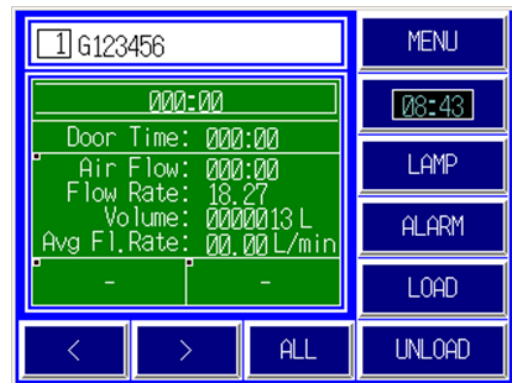

Painikkeesta All pääsee paikan 1 endoskoopin kaikkiin tietoihin ja samasta painikkeesta takaisin.



Näyttö häiriötilanteessa tai kun endoskoopin säilytysaika ylittyy.

## Scope-Store ENT kuivaus- ja säilytyskaappi

- Kaappi 10:lle tai 20:lle ENT-endoskoopille
- Endoskooppien paikat kahdessa tasossa
- Kaappiin saadaan turvallisesti kuivumaan pienet kanavattomat endoskoopit
- Säilytysaika jopa 30 päivää
- Kaapissa samat perustoiminnot kuin muissakin Scope-Store+ kaapeissa
- Ulko- ja sisämitat samat kuin Scope-Store V5 ja V10 -kaapissa



## SCOPE STORE+ monipuoliset mallit

Malli	Scope-Store V5	Scope-Store V10	Scope-Store S10
Tunniste	ED/SST/V5	ED/SST/V10	ED/SST/S8
Kapasiteetti, skooppia	5	10 (sisäosa kahdessa osassa)	10
Säilytys	Pysty	Pysty	Hylly
Sisämitat (KxLxS) mm	1675 x 665 x 450	1675 x 665 x 450 (per osa)	1675 x 555 x 515
Ulkomitat (KxLxS) mm	1925 x 1010 x 535	1925 x 1730 x 535	1925 x 900 x 605
Ulkomitat, läpiantoinen	1925 x 1040 x 620	1925 x 1730 x 675	1925 x 1040 x 675
Ripustimet	Endoskooppitelineet, ulosvedettävät		-
Hyllyt	-	-	Uloskäännettävät hyllyt, antibakteerinen käsittely. Ruostumattomat korit.
Ohjaus	Värillinen kosketusnäyttö, yksilöity PIN-koodisuojaus.		
Tulostin	Vakiovarusteena lämpökirjoitin.		
Sisävalo	Vakiovaruste.		
Lasiovipaneeli	Vakiovaruste.		
Ilmansyöttö	HEPA-suodatus ulkopuoliseen ja kanaviin. Puhallin ja kompressori vakiovaruste.		

### Lisävarusteita

1. Scope Store +mallit saatavana läpiannettavina
2. Viivakoodilukija
3. Mustesuihkutulostin
4. Scope Store NET-seurantaohjelma tietokoneelle
5. HEPA-suodattimien virtausmittaus
6. Kuivauskammion pohjasuoja estämään pitkien endoskooppien kosketus kammion pohjaan
7. Laaja valikoima adaptereita eri valmistajien endoskoopeille
8. USB-liitäntä
9. Ethernet-liitäntä
10. WIFI-liitäntä