

Kaiko-CrossChecks EO

STERILOINNIN VALVONTAAN

Kemiallinen CrossChecks EO prosessi-indikaattori on suunniteltu etyleenioksidisteriloinnin tehon tarkkailuun. Indikaattoriliuska tulisi asettaa jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.

Standardien En 867-1 luokan D, ISO 11140-1 luokan 4 mukainen.

Toiminta

Helppo todeta tulos värimuutoksen kautta. Liuskan keltainen muuttuu värinsä ruskeaksi, kun olosuhteet ovat olleet oikeat steriloitumisen kannalta.

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on valmiiksi painettuna ruskea vakiovärinen nuoli, joka auttaa tulkinnassa.

Värimuutos aika on 60 minuuttia, kaasupitoisuuden ollessa 600mg/l, lämpötilan 54 °C ja kosteuden 40 – 60 %.

Laminointi estää indikaattorin väriä leviämästä ja tuotteiden värjäytymistä.

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on painettuna tuotannon numerosarja.

Käyttö

Aseta indikaattoriliuska jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.



CrossChecks EO

Helppo käyttää

Etyleenioksidisteriloinnin tehon tarkkailuun

Helppo tulkinta

Laminointi

Pakkaus

250 kpl/paketti.
Tuotekoodi: CI-106.

Varastointi

Varastoi suojapussissa +10 – +38 °C lämpötilassa, 30-60 % ilmankosteudessa.

Varastointiaika: 2 vuotta valmistuspäivästä.

Indikaattoreiden varastoinnin tapahtuessa ohjeiden mukaisesti, säilyvät sen värit ennen ja jälkeen steriloinnin erinomaisesti.